

# SeptoAkcesoria

Od teraz. Na co dzień. Akcesoria Septodont.





## SPIS TREŚCI

### INSTRUMENTY

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Septo</b> Contact .....    | 4 |
| <b>Septo</b> Compo Shape..... | 6 |
| <b>Septo</b> Cure.....        | 8 |

### OPRACOWANIE I POLEROWANIE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Septo</b> Discs .....         | 10 |
| <b>Septo</b> Wheels PX.....      | 12 |
| <b>Septo</b> Polisher.....       | 14 |
| <b>Septo</b> Fipo Strip .....    | 16 |
| <b>Septo</b> Diamond Strip.....  | 18 |
| <b>Septo</b> Diamond Paste ..... | 20 |

### MATRYCE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>Septo</b> Matrix Cervical.....  | 22 |
| <b>Septo</b> Matrix Sectional..... | 24 |

### KLINY

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Septo</b> Wedges ..... | 26 |
|---------------------------|----|

### IZOLACJA STOMATOLOGICZNA

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Septo</b> Tape..... | 28 |
|------------------------|----|

### PROFILAKTYKA

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Septo</b> Prophy Strip..... | 30 |
|--------------------------------|----|

## INSTRUMENTY

# SeptoContact

### INSTRUMENT DO ODBUDOWY PUNKTU STYCZNEGO

#### WSKAZANIA

Narzędzia w dużym stopniu determinują właściwości użytkowe materiałów stomatologicznych. Dobrze dobrane instrumentarium wpływa na efektywność i ergonomię pracy dentysty. SeptoContact jest bardzo praktycznym w użyciu instrumentem zaprojektowanym do łatwiejszej oraz przede wszystkim powtarzalnej odbudowy punktów stycznych z kompozytów.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Gwarancja odbudowy perfekcyjnego punktu stycznego w powtarzalnej sekwencji „trzech kroków”.

- Możliwość wyboru instrumentu L do dużych ubytków oraz S do małych.
- Każde narzędzie posiada końcówkę dystalną i mezialną.
- Instrumenty przewodzą światło.
- Nadają się do sterylizacji.



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0105020018 | SeptoContact: 2 instrumenty, każdy posiada końcówkę dystalną i mezialną |

**Septo**Contact  
instrumenty



## INSTRUMENTY

# SeptoCompo Shape

### SILIKONOWE KOŃCÓWKI DO MODELOWANIA KOMPOZYTÓW

#### WSKAZANIA

Silikonowe końcówki SeptoCompo Shape to świetny pomysł na przyjemne i zakończone gwarantowanym sukcesem modelowanie bezpośrednich oraz pośrednich wypełnień. Łatwość manipulacji, kontrola adaptacji kolejnych warstw oraz możliwość „okielznania” każdego kompozytu pod kątem jego „klejenia się” to niekwestionowane zalety tych narzędzi. Każdy ruch tym instrumentem z łatwością wydobywa z kompozytu idealny, anatomiczny kształt wypełnienia. SeptoCompo Shape nadają się do sterylizacji, wraz z silikonowymi końcówkami.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Pozwalają uniknąć efektów linii między warstwami kompozytu, które mogą powstawać podczas stosowania techniki warstwowej.
- Zapewniają uzyskanie gładkiej powierzchni, co znacznie skraca czas ostatecznego opracowania i polerowania.
- Dostępne w dwóch wersjach z twardą i miękką końcówką, dla optymalnej pracy w zależności od twardości kompozytu.
- Kończówki są dostępne w 4 kształtach, co umożliwia dobranie ich do różnych przypadków klinicznych.



#### OPAKOWANIA

| Kod        | Opis   |
|------------|--|
| 0105020019 | SeptoCompo Shape: 2 instrumenty + 8 silikonowych końcówek (miękkie/twarde) |
| 0105020020 | SeptoCompo Shape Refill: 4 miękkie silikonowe końcówki                     |
| 0105020021 | SeptoCompo Shape Refill: 4 twarde silikonowe końcówki                      |

**Septo**Compo Shape  
instrumenty



## INSTRUMENTY

# SeptoCure


### INSTRUMENT POPRAWIAJĄCY SZCZELNOŚĆ ADHEZYJNYCH WYPEŁNIEŃ W REJONIE PRZYDZIAŚŁOWYM

#### WSKAZANIA

SeptoCure to narzędzie przeznaczone do poprawy adaptacji oraz zwiększenia efektywności polimeryzacji kompozytów, w trudno dostępnych dla światła rejonach. Nieszczelność wypełnień klasy II w okolicy dodziąsłowej ścian stycznych zostanie zasadniczo zminimalizowana wtedy, gdy lekarz wykorzysta instrument idealnie przewodzący światło lampy polimeryzującej oraz poprawiający adaptację kompozytu. Dzięki SeptoCure wypełnienie kompozytowe i system wiążący zostaną prawidłowo spolimeryzowane, co oznacza, nie tylko szczelność brzeżną, ale uzyskanie pożądanych parametrów mechanicznych.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Stworzone w celu zapobiegania i minimalizacji nieszczelności brzeżnej materiałów kompozytowych w wypełnieniach klasy II.
- Nie przylegają do kompozytów podczas reakcji polimeryzacji.
- Przezroczyste instrumenty umożliwiają efektywniejsze utwardzanie kompozytu za pomocą światła przewodzonego przez ich końcówki.
- Ułatwiają osiągnięcie prawidłowej adaptacji kompozytu do dna ubytku.
- Nadają się do sterylizacji.

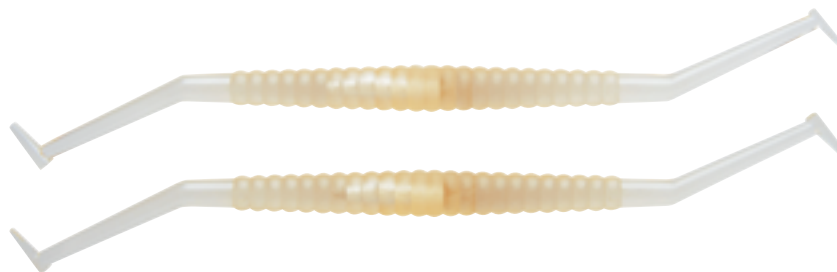

#### OPAKOWANIA

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0105010002 | SeptoCure: 2 instrumenty z 4 różnymi końcówkami |



**SeptoCure**  
instrumenty



# OPRACOWANIE I POLEROWANIE

## SeptoDiscs

### KRĄŻKI DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA I POLEROWANIA WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH

#### WSKAZANIA

SeptoDiscs to krążki pozwalające uzyskać najważniejsze detale powierzchni: gładkość i połysk!

**Odpowiedni zakres elastyczności:** umożliwia dostęp do powierzchni stycznych oraz przedSIONKOWYCH.

**Mniejsza grubość:** ułatwia, a często w trudno dostępnych miejscach, po prostu umożliwia nadawanie kształtu powierzchni stycznych.

#### Wysokiej jakości efekt końcowy:

minimalna szorstkość powierzchni, wysoki połysk.

**Wysoka ścieralność:** lepsze opracowanie końcowe w krótszym czasie, usuwanie dużych nadmiarów.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wygodne podczas manipulacji, trwałe i łatwe w aplikacji.
- System mandreli pop-on umożliwia błyskawiczne montowanie oraz odwracanie krążków.
- Ultradrobnoziarniste krążki, bardzo elastyczne i wszechstronne. Idealne do opracowania trudno dostępnych powierzchni.
- Cztery rodzaje ziarnistości oznaczone kolorami, dostępne w rozmiarach 1/2" i 3/8" umożliwiają trafny, zindywidualizowany wybór.



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0102000146 | SeptoDiscs Kit: 120 różnych krążków + SeptoDiscs Mandrel (ø 1/2": 20x Coarse, 20x Medium, 20x Fine, 20x Extra-Fine, ø 3/8": 10x Coarse, 10x Medium, 10x Fine, 10x Extra-Fine) |
| 0102000147 | SeptoDiscs Assorted Refill ø 1/2": 50 krążków (15x Coarse, 15x Medium, 10x Fine, 10x Extra-Fine)  |
| 0102000148 | SeptoDiscs Coarse Refill ø 1/2": 50 szt.  |

| Kod        | Opis   |
|------------|--|
| 0102000149 | SeptoDiscs Medium Refill ø 1/2": 50 szt.     |
| 0102000150 | SeptoDiscs Fine Refill ø 1/2": 50 szt.       |
| 0102000151 | SeptoDiscs Extra-Fine Refill ø 1/2": 50 szt. |
| 0110000005 | SeptoDiscs Mandrel: 1 szt.                   |
| 0102000153 | SeptoDiscs Assorted Refill ø 3/8": 50 szt.   |
| 0102000154 | SeptoDiscs Coarse Refill ø 3/8": 50 szt.     |
| 0102000155 | SeptoDiscs Medium Refill ø 3/8": 50 szt.     |
| 0102000156 | SeptoDiscs Fine Refill ø 3/8": 50 szt.       |
| 0102000157 | SeptoDiscs Extra Fine Refill ø 3/8": 50 szt. |

# SeptoDiscs

opracowanie i polerowanie



## OPRACOWANIE I POLEROWANIE

### SeptoWheels PX

#### IMPREGNOWANE KRAŻKI FILCOWE

##### WSKAZANIA

Wykonanie idealnego wypełnienia wymaga umiejętności, doskonałych materiałów i niezawodnego instrumentarium. Aby uzyskać wyjątkowy efekt końcowy polerowania nieodzownym elementem są krążki filcowe SeptoWheels PX!

Światło odbijając się lub załamując na powierzchni daje pożądane zjawisko naturalnego wyglądu odbudowy. Krążki filcowe SeptoWheels PX wykonane są z naturalnej wełny impregnowanej abrazyjną pastą polerską, aktywowaną kilkoma kroplami wody.

##### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Znakomity efekt podczas końcowego polerowania, czyli naturalnie błyszczące powierzchnie.
- Gwarancja pięknych, białych i błyszczących zębów po zabiegach wybielania.
- Impregnowane ultra drobnoziarnistą, odwodnioną pastą polerską aktywowaną kilkoma kroplami wody.
- Dostępne w rozmiarze 9,5 mm.



##### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis   |
|------------|--|
| 0101010006 | SeptoWheels PX*: 12 impregnowanych krążków filcowych + SeptoPlus Mandrel |
| 0110010004 | SeptoPlus Mandrel: 1 szt.  |

\*wymagana SeptoPlus Mandrel

# SeptoWheels PX

opracowanie i polerowanie



# OPRACOWANIE I POLEROWANIE

## SeptoPolisher


### SILIKONOWE GUMKI DO KOMPOZYTÓW, GLASJONOMERÓW I AMALGAMATÓW

#### WSKAZANIA

SeptoPolisher oferuje skrócony algorytm postępowania klinicznego podczas pracy silikonowymi gumkami. W zależności od przyłożonej siły możliwe jest uzyskanie efektu końcowego opracowania i polerowania za pomocą tylko jednego narzędzia. Przyłożenie większej siły intensyfikuje efektywności fazy opracowania końcowego. Aby uzyskać oczekiwaną jakość polerowania, należy użyć mniejszej siły, co prowadzi do otrzymania gładkiej oraz błyszczącej jak szkliwo powierzchni.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jedna gumka wystarczy dla uzyskania pożądanego efektu końcowego opracowania oraz polerowania wypełnienia, zapewniając oszczędność czasu oraz materiału podczas procedury.
- Gumki wyróżniają się dużą wytrzymałością i służą do wielokrotnego użytku, nadają się do sterylizacji.
- Dostępne w 3 kształtach: stożka, tarczy i kielicha.

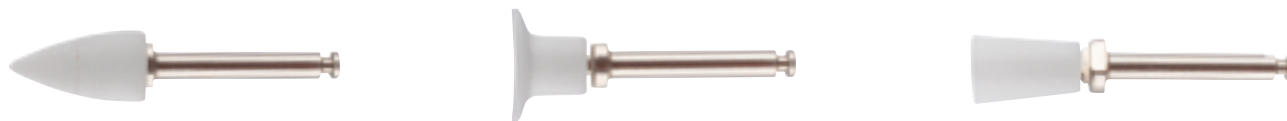

#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis   |
|------------|--|
| 0100000010 | SeptoPolisher * Assorted Refill: 8 szt. + SeptoPlus Mandrel (3x stożek, 3x tarcza, 2x kielich) |
| 0100000011 | SeptoPolisher * Refill: 8 szt. stożków + SeptoPlus Mandrel                                     |
| 0100000012 | SeptoPolisher * Refill: 8 szt. tarczy + SeptoPlus Mandrel                                      |
| 0100000013 | SeptoPolisher * Refill: 8 szt. kielichów + SeptoPlus Mandrel                                   |
| 0110010004 | SeptoPlus Mandrel: 1 szt.  |

\*wymagana SeptoPlus Mandrel

# SeptoPolisher

opracowanie i polerowanie



## OPRACOWANIE I POLEROWANIE

### SeptoFipo Strip

#### POLIESTRÓWE PASKI POKRYTE NASYPEM Z TLENKU GLINU

##### WSKAZANIA

Pasek profilaktyczny pokryty nasypem, który można łatwo wprowadzić w przestrzeń międzyzębową i bez przeszkód przesunąć przez punkt kontaktu, nie powodując tym samym jego destrukcji.

##### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Przeznaczone do procedur opracowania i polerowania kompozytów
- Charakteryzują się powierzchnią, gdzie znajdują się obszary pokryte nasypem o średnim lub bardzo drobnym uziarnieniu oddzielone od siebie obszarami neutralnymi.
- Dostępne w szerokościach: 2,5 mm oraz 4,0 mm.



##### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis                                |
|------------|-------------------------------------|
| 0106020015 | SeptoFipo Strip: 100 sztuk (2,5 mm) |
| 0106020016 | SeptoFipo Strip: 100 sztuk (4 mm)   |



# SeptoFipo Strip

opracowanie i polerowanie



## OPRACOWANIE I POLEROWANIE

# SeptoDiamond Strip

### PASKI ZE STALI NIERDZEWNEJ POKRYTE NASYPEM DIAMENTOWYM

#### WSKAZANIA

Pasek profilaktyczny pokryty drobnym nasypem diamentowym (fine i medium) do ostatecznego opracowania wypełnień.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Przeznaczone do ostatecznego opracowania wypełnień
- Przydatne podczas ortodontycznego zabiegu "strippingu"
- Dostępne w szerokości 2,5 mm.




#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0106010005 | SeptoDiamond Strip Fine: 12 sztuk, rozm. 2,5mm          |
| 0106010006 | SeptoDiamond Strip Medium: 12 sztuk, rozm. 2,5mm        |
| 0106010007 | SeptoDiamond Strip (fine&medium): 12 sztuk, rozm. 2,5mm |

# SeptoDiamond Strip

opracowanie i polerowanie

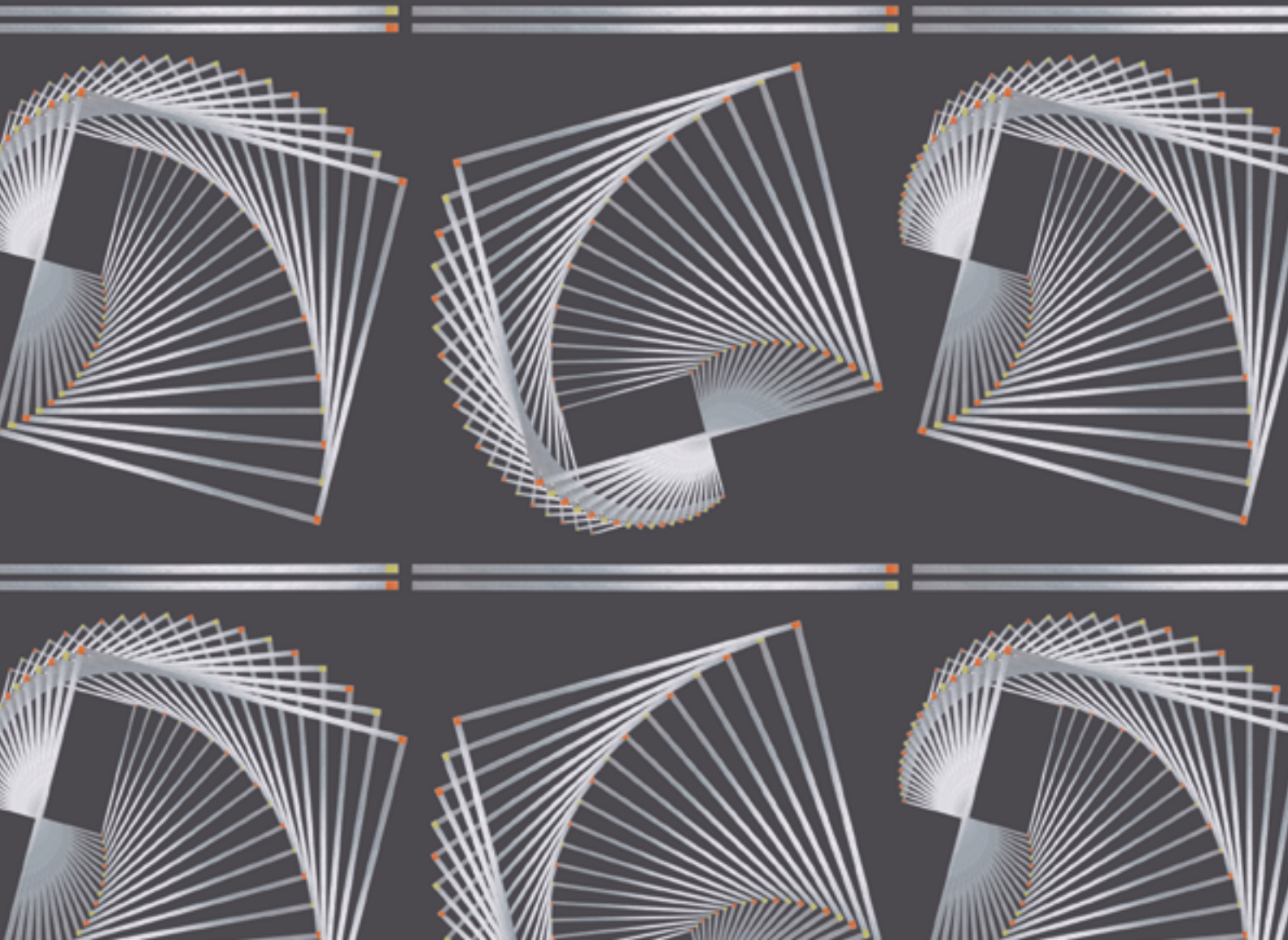

## OPRACOWANIE I POLEROWANIE

# SeptoDiamond Paste

### DIAMENTOWA PASTA POLERSKA

#### WSKAZANIA

SeptoDiamond Paste to diamentowa pasta polerska przeznaczona do końcowego polerowania i uzyskania najwyższej jakości estetyki rekonstrukcji bezpośrednich i pośrednich. Zapewnia niezrównany połysk szkliwa, ceramiki, kompozytów, amalgamatów oraz powierzchni metali. Zalecana jest do stosowania z krążkami filcowymi SeptoWheels PX.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Uzyskanie wysokiego połysku oraz efektu naturalnej barwy materiałów odtwórczych i szkliwa.
- Możliwość wykorzystania w gabinecie stomatologicznym i laboratorium.
- Ekstra drobnoziarnisty piasek (1-2 mikrony).
- Wysoka rozpuszczalność w wodzie, więc pozostałości są łatwe do usunięcia.



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis                              |
|------------|-----------------------------------|
| 0101060003 | SeptoDiamond Paste: 2g strzykawka |

# SeptoDiamond Paste

opracowanie i polerowanie



## MATRYCE

# SeptoMatrix Cervical

### SYSTEM PRZEZROCZYSTYCH KSZTAŁTEK PRZEZNACZONYCH DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY V

#### WSKAZANIA

Kształtki przyszyjkowe SeptoMatrix Cervical są doskonałą pomocą podczas modelowania kompozytów. Doświadczeni praktycy są pragmatyczni w swych wyborach i dlatego doceniają tylko wyjątkowej jakości akcesoria oraz instrumenty. Zestaw formówek obejmuje pięć elastycznych kształtek w różnych rozmiarach. Zapewniają wygodę pracy, skrócenie czasu modelowania oraz doskonałą adaptację w okolicy brzegu dodziąsłowego.



#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dzięki różnym rozmiarom formówki mogą być łatwo dostosowane do wszystkich ubytków klasy V.
- Kompozyty są utwardzane światłem przez przezroczystą kształtkę, dzięki czemu uzyskuje się gładką powierzchnię, co znacząco ogranicza konieczność opracowywania i ułatwia polerowanie.
- Nie przykleja się do kompozytów i glasonomerów.
- Nadają się do sterylizacji.



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0105040016 | SeptoMatrix Cervical: 2 instrumenty + 10 kształtek (2x Extra-Large, 2x Large, 2x Medium, 2x Small, 2x Extra-Small)      |
| 0105040017 | SeptoMatrix Cervical Assorted Refill: 50 kształtek (10x Extra-Large, 10x Large, 10x Medium, 10x Small, 10x Extra-Small) |
| 0105040018 | SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Large   |
| 0105040019 | SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Large   |
| 0105040020 | SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Medium  |
| 0105040021 | SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Small   |
| 0105040022 | SeptoMatrix Cervical Refill: 50 kształtek Extra-Small   |

# SeptoMatrix Cervical

matryce



## MATRYCE

# SeptoMatrix Sectional

### ANATOMICZNE KSZTAŁTKI CZĘŚCIOWE WRAZ ZE WZMOCNIONYMI PIERŚCIENIAMI DO ODBUDOWY UBYTKÓW KLASY II

#### WSKAZANIA

System SeptoMatrix Sectional jest przeznaczony do rekonstrukcji ubytków klasy II. Zapewnia najdogodniejsze z możliwych warunków, do precyzyjnego odtworzenia punktów stykowych i uzyskania naturalnej anatomii zęba.

Pierścienie są wyposażone w trójkątne silikonowe końcówki dla uzyskania idealnej adaptacji kształtki. Dodatkowe wzmocnienie zapewnia kontrolowaną siłę podczas separacji – pierścień twardy (niebieski) lub pierścień miękki (różowy), większą stabilność podczas wykonywania zabiegu oraz zwiększoną trwałość pierścienia.

#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0103020150 | SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 100 kształtek (30x Large, 40x Medium, 30x Small) + 2 pierścienie (twardy i miękki) + 14 trójkątnych silikonowych końcówek |
| 0103020151 | SeptoMatrix Sectional Assorted Kit: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small) + 2 pierścienie (twardy i miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek   |
| 0103020152 | SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (twardy) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek  |
| 0103020153 | SeptoMatrix Sectional Refill: 1 pierścień (miękki) + 8 trójkątnych silikonowych końcówek  |
| 0103020154 | SeptoMatrix Sectional Assorted Refill: 50 kształtek (15x Large, 20x Medium, 15x Small)  |
| 0103020155 | SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Large  |
| 0103020156 | SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Medium   |
| 0103020157 | SeptoMatrix Sectional Refill: 50 kształtek Small  |
| 0103020158 | SeptoMatrix Sectional trójkątne silikonowe końcówki: 50 szt.  |

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wzmocnienie wykonane z trwałego materiału.
- Unikalny projekt: zapewnia stabilizację, umożliwia bezpieczne otwieranie za pomocą kleszczy.
- Łatwe, szybkie i wygodne zakładanie dzięki systemowi pierścieni, które zastępują typowe napinacze.
- Anatomiczne kształtki są dostępne w 3 różnych rozmiarach dla dywersyfikacji adaptacji w różnych przypadkach klinicznych.
- Pierścienie wraz z silikonowymi końcówkami nadają się do sterylizacji.







**Septo**Matrix Sectional  
matryce

## KLINY

# SeptoWedges

### ANATOMICZNE KLINY DREWNIANE

#### WSKAZANIA

Jednym z wymogów procedury wykonania wypełnienia jest odtworzenie kształtu anatomicznego. Wiąże się to z koniecznością wykorzystywania metod i narzędzi, które zwiększając efektywność zabiegu, czynią go wysoce powtarzalnym. Kliny są właśnie takim elementem, wpisanym na stałe w algorytm pracy dentysty.

| nr | wysokość | szerokość | długość |
|----|----------|-----------|---------|
| 1  | 2,2mm    | 1,4 mm    | 12 mm   |
| 2  | 2,2mm    | 1,4 mm    | 13 mm   |
| 3  | 2,2mm    | 1,6 mm    | 14 mm   |
| 4  | 2,2mm    | 1,6 mm    | 15 mm   |
| 5  | 2,5 mm   | 2,0 mm    | 16 mm   |

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Anatomicznie ukształtowane dla lepszego dopasowania do przestrzeni stycznych i lekkiego odseparowania sąsiednich zębów.
- Dostępne w 5 rozmiarach oznaczonych kolorami.



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0104020014 | SeptoWedges Assorted: 100 szt. (30x żółte, 20x zielone, 20x czerwone, 20x fioletowe, 10x naturalne) |
| 0104020015 | SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny żółte  |
| 0104020016 | SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny zielone  |
| 0104020017 | SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny czerwone   |
| 0104020018 | SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny fioletowe  |
| 0104020019 | SeptoWedges Refill: 100 szt. – kliny naturalne  |

**Septo**Wedges  
kliny



# IZOLACJA STOMATOLOGICZNA

## SeptoTape

### TAŚMA TEFLONOWA DO IZOLACJI PODCZAS ZABIEGÓW STOMATOLOGICZNYCH

#### WSKAZANIA

SeptoTape jest przeznaczona do izolacji zębów podczas wytrawiania, a także przy stosowaniu kondycjonerów, kompozytów i innych preparatów. Wykonana z obojętnego i elastycznego materiału, taśma idealnie dopasowuje się do zęba, skutecznie chroniąc zęby sąsiednie przed niepożądanymi kontaktami z różnymi preparatami podczas zabiegu odbudowy.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY


- Skuteczna ochrona izolowanych zębów przed niepożądanym działaniem substancji stosowanych podczas zabiegów
- Wysoka odporność na działanie kwasów, systemów wiążących i innych preparatów chemicznych
- Jest wyjątkowo elastyczna i cienka, dlatego z łatwością można ją wprowadzać w obszary przestrzeni międzyzębowych
- Zaprojektowana wyłącznie na potrzeby użycia w stomatologii



#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis   |
|------------|--|
| 0111050005 | SeptoTape: 5 m stomatologicznej teflonowej taśmy izolacyjnej |

**SeptoTape**  
izolacja stomatologiczna

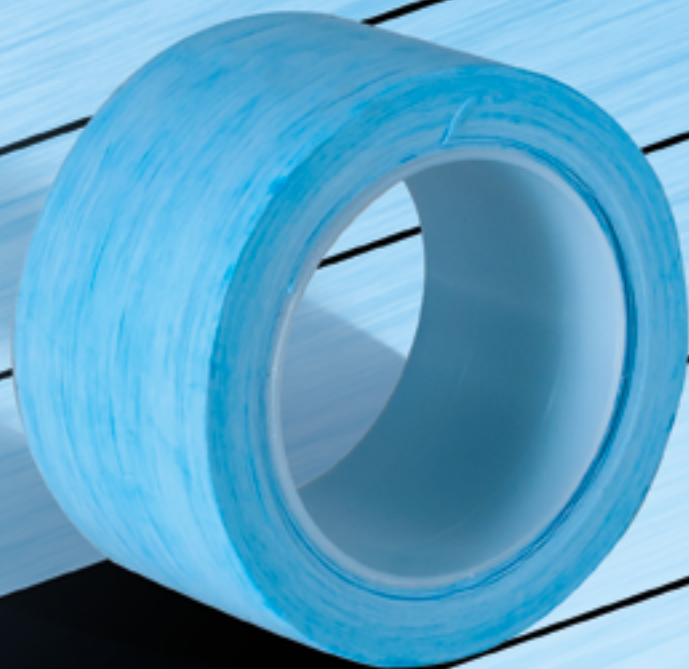

## PROFILAKTYKA

# SeptoProphy Strip


### NIEABRAZYJNE PASKI METALOWE DO USUWANIA KAMIENIA NAZĘBNEGO Z PRZESTRZENI MIĘDZYŻĘBOWYCH

#### WSKAZANIA

Pasek profilaktyczny jest nieodzowną pomocą podczas zabiegów profilaktycznych. SeptoProphy Strip wyróżnia się okrągłymi mikroostrzami umieszczonymi wokół otworów na jednej z powierzchni paska. Zapewnia silne i precyzyjne działanie eliminujące kamień nazębny, tym samym zachowując integralność szkliwa i materiałów wypełniających. Ze względu na grubość wynoszącą zaledwie 0,05 mm, bardzo łatwo jest uzyskać dostęp do obszaru przestrzeni międzyzębowej.

#### WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwe, szybkie i bezpieczne usuwanie kamienia nazębego bez uszkodzania szkliwa zębów
- Nieabrazyjne działanie, kamień nazębny jest usuwany mechanicznie przez mikroostrza znajdujące się na powierzchni paska
- Łatwy dostęp do przestrzeni międzyzębowej dzięki grubości 0,05 mm.

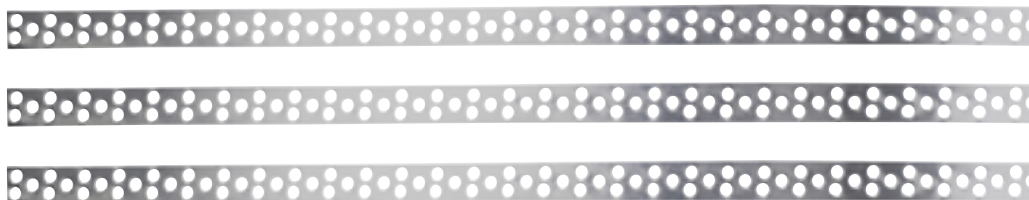

#### OPAKOWANIE

| Kod        | Opis  |
|------------|---|
| 0109010001 | SeptoProphy Strip: 10x perforowanych pasków |

The background of the image consists of several horizontal bands of perforated metal strips. Each strip is a light gray color with a regular grid of small, dark circular holes. The strips are separated by thin black lines, creating a repeating pattern that fills the entire frame.

# SeptoProphy Strips

profilaktyka

[www.akcesoriaseptodont.pl](http://www.akcesoriaseptodont.pl)



**Septodont Polska sp. z o.o.**

ul. Taneczna 18 A, 02-829 Warszawa

tel.: +48 22 545 89 50

[www.septodont.com.pl](http://www.septodont.com.pl)